



手動 車椅子用段差解消リフト


[SKL-610]

設置が簡単・小スペース・低コスト


- アルミサッシの乗り越え用大型自動開閉フラップ標準装備
- 小スペース・組立式で搬入搬出が簡単
- 操作が簡単な手動ジャッキ
- ジャッキ方向・フラップ方向自由自在（乗降方向・ジャッキ方向自由）
- フラットテーブルで走行がスムーズ
- さびに強いメッキ仕上げで屋外設置OK！





1
リフトテーブルに対して
まっすぐゆっくりと
前方から乗り込みます。

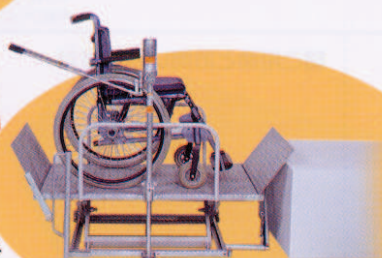

2
車椅子のブレーキをかけ、
ジャッキハンドルを大きく
操作し、リフトを上昇させます。

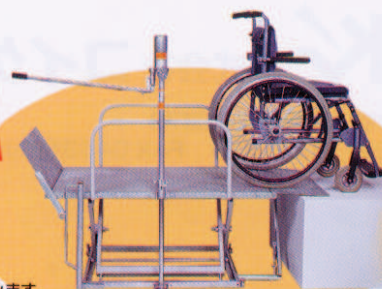

3
車椅子のブレーキを
はずし上の段に乗り込みます。

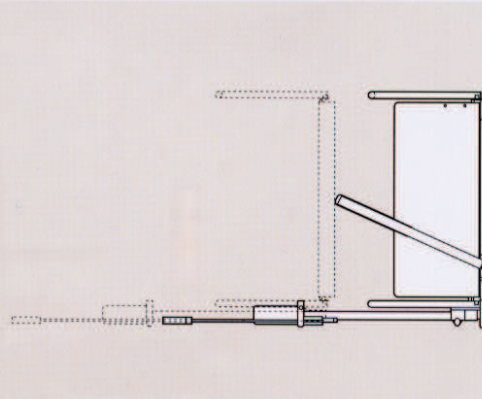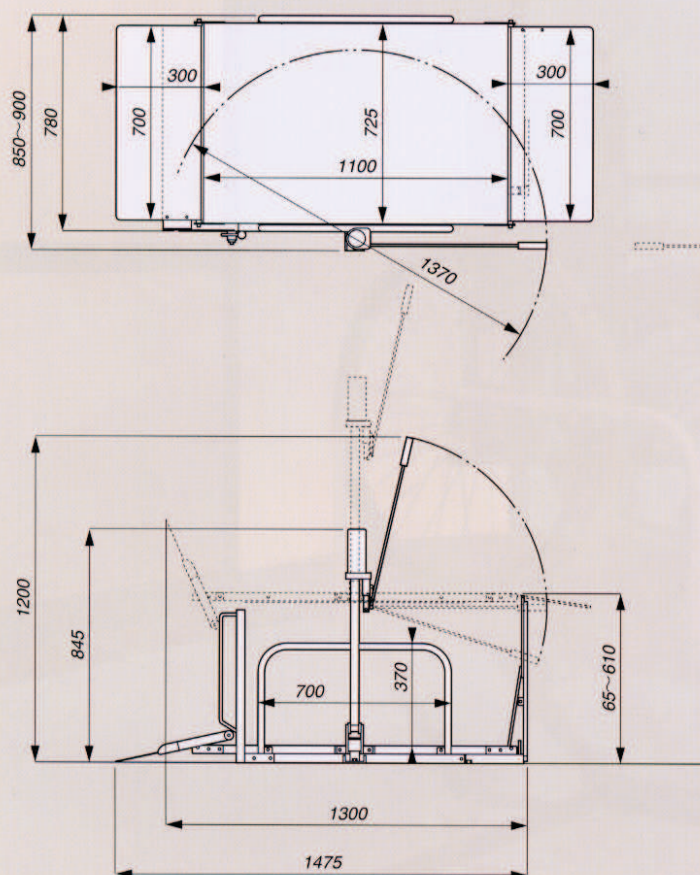

ジャッキ操作方法



仕 様

項 目	内 容
材 質	スチール(溶融亜鉛メッキ・塗装仕上)
駆 動 方 式	油圧(手動)
テーブル最低最高位置	65~610mm
昇 降 ス ト ロ ーク	545mm
テ ー ブ ル サ イ ズ	1100×725mm(乗り降りフラップ各300×700mm)
最 大 積 載 荷 重	150kg
重 量	70kg(分解組立て式・分解時最大部品38kg)

本仕様・価格は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
本書からの無断の複製はかたくお断りします。

KIKO 株式会社 コイケ

〒254-0014 神奈川県平塚市四之宮73
TEL 0463(22)1217(代表) FAX 0463(21)5883

■ご用命とお問い合わせは